

❗ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Sayın Kullanıcılarımız,

Son dönemde bazı cihazlarda su sistemlerinde meydana gelen **kir, kireç ve biyolojik birikim** sorunları üzerine aşağıdaki bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı önemle rica ederiz.

💧 Su Sistemi ve Soğutma Hakkında

Tüm profesyonel **lazer ve ışık tabanlı epilasyon cihazlarında**, lamba ve ışık kaynakları **su ile soğutulmaktadır**. Bu nedenle **su sistemlerinin temizliği hayati öneme sahiptir**.

➡ Bu yüzden **yalnızca distile su kullanılması zorunludur**.

? Distile Su Nedir?

Distile su, kaynatılmış suyun buharının tekrar sıvılaştırılmasıyla (yoğunlaştırılmasıyla) elde edilen **tamamen saf, minerallerden ve organik maddelerden arındırılmış sudur**.

Marketlerde veya eczanelerde "distile su" olarak satılır.

✦ **Minimum kabul edilebilir alternatif:** Arıtılmış suyun kaynatılıp soğutulması ile elde edilen su, distile suya daha yakın olup **acil durumlarda kısa süreli kullanılabilir**. Ancak bu da sadece geçici çözümdür.

❌ Distile Su Kullanılmazsa Ne Olur?

- Cihazın iç su kanalları ve başlıkları tıkanır.
- **Kireç ve biyolojik oluşumlar** (müsilaj benzeri maddeler) oluşur.
- Başlık ve cihazda **sürekli arızalar meydana gelir**.
- Atış ömrü ciddi şekilde kısalır.
- Bazı vakalarda başlık **kullanılamaz hale gelir**.

Bu birikimler cihaz ve başlık içindeki su hatlarından **gözlemlenebilir durumdadır**.

⚠ Özellikle dikkat edilmesi gerekenler:

- **Sadece birkaç günlüğüne bile** distile olmayan su kullanılsa,
- Organik maddeler hızla çoğalır,
- Su sisteminde geri dönüşü zor hasarlar oluşur.

🔧 Bu Durumda Ne Gerekli?

- Cihazın **detaylı iç temizliği**,
- Su sisteminde yer alan **parçaların değişimi**,
- **Başlıkların yenilenmesi** zorunludur.

🔒 Bu işlemler mutlaka **firmamız tarafından** yapılmalıdır.

Temizlik işlemleri hem **mekanik hem kimyasal yöntemler** içerdiğinden,

kullanıcı tarafından yapılması mümkün değildir ve kesinlikle denenmemelidir.

Sadece başlık değişimi **kesinlikle yeterli değildir**. Cihaza da profesyonel müdahale gereklidir.

✖ Garanti Durumu

Bu tür hasarlar **kullanıcı hatası** kapsamında değerlendirilir.

Garanti dışıdır ve **ücretli müdahale gerektirir**.

Temizlik ve bakım yapılmazsa, cihaz garantisi tamamen geçersiz hale gelir.

Görsel Kanıt Örnekleri

Aşağıda, bu sorunlardan etkilenen cihazlara ait örnek görseller sunulmuştur. Lütfen karşılaştırma yapınız.

Saygılarımızla,

X Medikal Ltd.

X MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
Tax ID: 8151119660
Phone: +90 541 172 2020
Email: info@xmedikal.com
Toros Mah., Adana, Turkey

